

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Ago/19
	Instrução de Uso	IUKCTUB1-H rev. 00

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Kit Cirúrgico

Nome Comercial: Kit Cirúrgico para Tórax U-BAR* - BASICS* I Halyard

Modelo

88876: Kit Cirúrgico para Tórax U-BAR* - BASICS* I Halyard

Especificações

<u>Descrição</u>	<u>Tamanho</u>	<u>Quantidade</u>
Cobertura de Mesa com Zona Reforçada	112 cm x 229 cm	1
Cobertura Mesa Mayo	58 cm x 137 cm	1
Campo Cirúrgico	244 cm x 112 cm	1
Campo em U para o Tórax	193 cm x 305 cm	1

Registro Anvisa: 81832580041

Reprocessamento Proibido.



Prazo de Validade: 05 anos

Embalagem unitária de Papel Grau Cirúrgico ou Tyvek*.

Produto estéril - Óxido de Etileno. Não reesterilizar.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Ago/19
	Instrução de Uso	IUKCTUB1-H rev. 00


Fotos

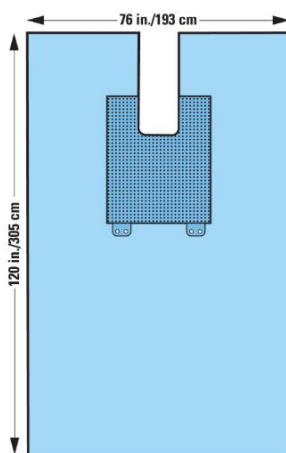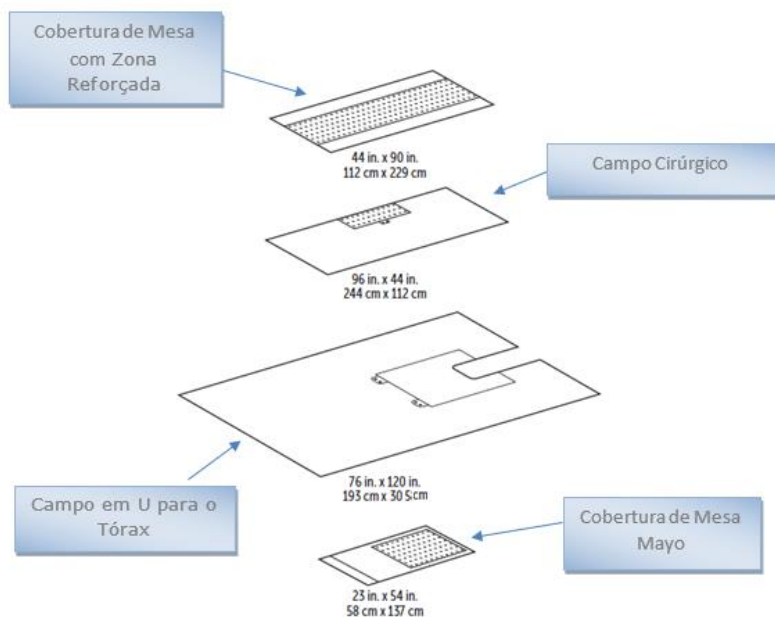

Conteúdo

Cada unidade do Kit é composta por: 01 Cobertura de Mesa com Zona Reforçada, 01 Cobertura de Mesa Mayo, 01 Campo Cirúrgico e 01 Campo em U para o Tórax.

Cada kit é embalado individualmente em embalagem de Papel Grau Cirúrgico ou Tyvek* com Filme Plástico. As embalagens são armazenadas em uma bolsa de Polietileno contendo 08 unidades. E então, é acondicionado em caixa papelão para transporte, contendo 1 bolsa com 08 unidades.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Ago/19
	Instrução de Uso	IUKCTUB1-H rev. 00

Descrição e Indicação

Os pacotes cirúrgicos são divididos em grupos que dependem da especialidade cirúrgica e dos requisitos do procedimento cirúrgico.

Os Kit's Cirúrgicos são usados em hospitais nas salas de cirurgia. Especificamente, os kit's cirúrgicos são usados para cobrir os pacientes, proporcionando uma barreira estéril entre o paciente e o médico durante procedimentos cirúrgicos. Em alguns produtos, os campos também fornecem absorção de fluidos, controle de instrumentos e linha e capacidade de coleta de fluidos.

Instruções de Uso

- Remova o pacote cirúrgico da embalagem com técnica asséptica, liberando o campo sobre a mesa auxiliar estéril.
- Desdobre o pacote cirúrgico com cuidado e de forma asséptica na mesa auxiliar e utilize os produtos na ordem em que estão dispostos.
- Todos os componentes do kit devem ser descartados após o uso, de acordo com as regulamentações e normas ambientais locais.

Composição

Cobertura de Mesa com Zona Reforçada: Filme de Polietileno Laminado com Spunbond (Polipropileno)

Campos: SMS com Área de Reforço (Polietileno e Polipropileno)

Cobertura Mesa Mayo: Filme de Polietileno com Área de Absorção com Reforço em Spunbond (Polipropileno)

Não contém látex.


Não contém DEHP.

Condições de Armazenamento

O produto deve ser armazenado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

Condições para o Transporte

O produto deve ser transportado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Ago/19
	Instrução de Uso	IUKCTUB1-H rev. 00

Condições de Manipulação

Todos os componentes do kit devem ser descartados após o uso, de acordo com as regulamentações e normas ambientais locais.

Advertências

Proibido Reprocessar.

Precauções

Descartar após o uso.

Não utilize se a embalagem estiver violada ou danificada.

Contraindicações:

Não aplicável.

Registrado por: CEDRS Gestão Empresarial.

Rua Silva Bueno nº 1660 conjunto 1001 – Ipiranga– São Paulo – SP – CEP: 04208-001.

CNPJ: 27.242.576/0001-11.

RT: Maria Angélica Rodrigues Pereira – COREN/SP: 039.294.

Distribuidor: CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

Rua Gama Cerqueira nº 331 e 337 – Cambuci – São Paulo – SP - CEP: 01539-010 -

CNPJ: 00.142.576/0001-86

Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br

Responsável Técnico: Morgana Borges de Araújo – CRF-SP: 74338

Fabricante Responsável: Halyard Health, Inc

5405 Windward Parkway - Alpharetta, Georgia – 30004 – Estados Unidos da América