

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	IUNUDH-T rev.01
	Instrução de USO RDC185/01	

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Nebulizador

Nome Comercial: Nebulizador descartável de pequeno volume Up-Draft

Código do Fabricante: 1705, 1706, 1707, 1710, 1712, 1713.

Nº de registro na ANVISA: 10342600010

Produto de reprocessamento proibido

Prazo de Validade: 05 anos

Embalagem: Unitária.

Produto pronto uso

Não estéril

Fotos



1705, 1706, 1707



1710, 1712, 1713

Modelo	Código	Reservatório (Volume em ml)	Tubo 2,10 m STAR LUMEN	Conector padrão	Conector universal	Máscara*
NEBULIZADOR DE PEQUENO VOLUME	1705	8 (anti-derrame)	Sim	Sim	N/A	Máscara adulto alongada
	1706	8 (anti-derrame)	Sim	Sim	N/A	Máscara adulto
	1707	8 (anti-derrame)	Sim	Sim	N/A	Máscara pediátrica
	1710	15	Sim	N/A	N/A	Máscara adulto alongada
	1712	15	Sim	N/A	N/A	Máscara adulto
	1713	15	Sim	N/A	N/A	Máscara pediátrica

Indicação e Finalidade

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	IUNUDH-T rev.01
	Instrução de USO RDC185/01	

A terapia com nebulizadores de pequeno volume é indicada para uso em hospitais e home care. Sua finalidade é o tratamento de obstrução da via aérea. A obstrução da via aérea é uma das causas mais comuns dos problemas respiratórios e pode ser consequência de:

- Doenças crônicas tais como asma, bronquite crônica e enfisema;
- Exposição à poluição ambiental em local de trabalho;
- Fumantes de longo prazo,
- Exposição à fumaça, fumos e outras substâncias nocivas presentes na atmosfera;
- Alergias, gripes, resfriados e pneumonia.

Modo de Uso

- Coloque a solução prescrita no copo do nebulizador.
- Conecte a tampa do copo do nebulizador girando-a no sentido horário.
- Conecte o tubo de suprimento de O₂ entre a fonte de gás e o nebulizador.
- Conecte o copo de nebulizador na máscara.
- Ajuste o fluxo de gás. Verifique visualmente o aparecimento de névoa. Caso necessário, dê uma leve batida no copo até que se inicie a nebulização.
- Coloque a máscara no paciente.

Componentes e Composição

Copo do nebulizador (Reservatório): Poliestireno

Tampa do reservatório: Poliestireno

Conector: PVC

Tubo de suprimento de O₂ (2,10m): PVC

Máscara: PVC

Condições de Armazenamento, transporte:

O produto deve ser mantido em local seco, fresco e protegido da luz solar.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	IUNUDH-T rev.01
	Instrução de USO RDC185/01	

Condições de Manipulação

N/A

Advertências:

Proibido reprocessar.


Importador/Distribuidor: CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

Rua Gama Cerqueira, 331 - CEP: 01539-010 - Cambuci - São Paulo – SP

Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br

Responsável Técnico: Morgana Borges de Araújo – CRF-SP: 74338

Fabricante: TELEFLEX MEDICAL 2917, Weck Drive - Research Triangle Park, NC 27709

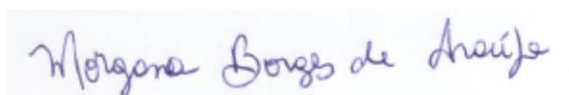

Responsável Técnico

Morgana Borges de Araújo
Farmacêutico - CRF/SP: 74338