	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Ago/19
	Instrução de Uso	IUKOCP-H rev. 00

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Kit Cirúrgico

Nome Comercial: Kit Cirúrgico Otorrino para Cabeça e Pescoço Halyard

Modelo

88711: Kit Cirúrgico Otorrino para Cabeça e Pescoço Halyard

Especificações

<u>Componentes</u>	<u>Tamanho</u>	<u>Quantidade</u>
Cobertura de Mesa	112 cm x 229 cm	1
Avental ULTRA	Grande	1
Cobertura Mesa Mayo com Zona Reforçada	58 cm x 137 cm	1
Campo Split para Cabeça e Pescoço	193 cm x 314 cm	1
Campo para Cabeça (modelo turbante)	127 cm x 91 cm	1
Toalha Absorvente	38 cm x 56 cm	2
Saco Descartável para Fios de Sutura	28 cm x 30 cm	1

Registro Anvisa: 81832580005

Reprocessamento Proibido.


Prazo de Validade: 05 anos

Embalagem unitária de Papel Grau Cirúrgico ou Tyvek*.

Produto estéril - Óxido de Etileno. Não reesterilizar.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Ago/19
	Instrução de Uso	IUKOCP-H rev. 00

Foto

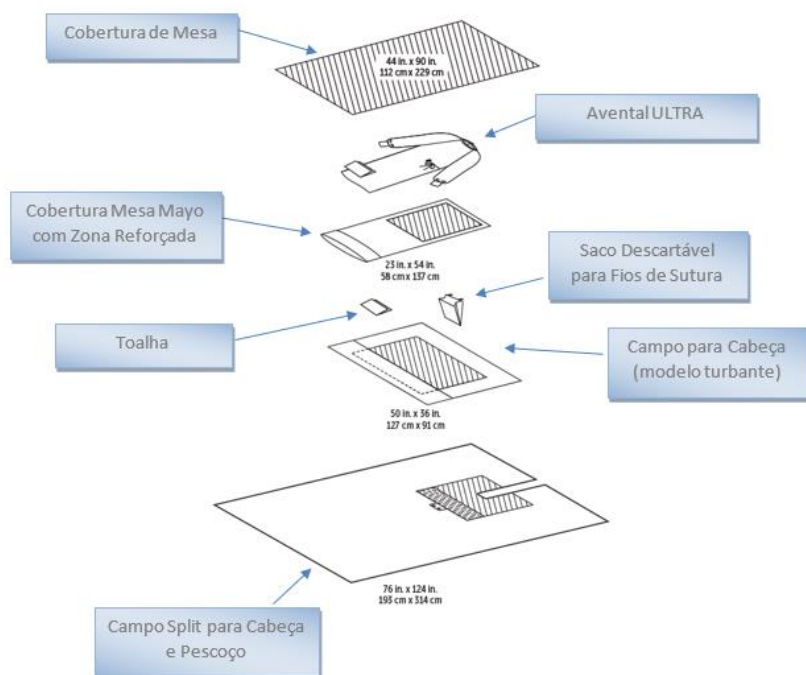

Conteúdo

Cada unidade do Kit é composta por: 01 Cobertura de Mesa, 01 Avental ULTRA, 01 Cobertura de Mesa Maya com Zona Reforçada, 01 Campo Split para Cabeça Pescoço, 01 Campo para Cabeça (modelo turbante), 02 Toalhas Absorventes e 01 Saco Descartável para Fios de Sutura.

Cada kit é embalado individualmente em embalagem de Filme Plástico e Papel Grau Cirúrgico ou Filme Plástico e Tyvek*. As embalagens são armazenadas em uma bolsa de polietileno contendo 05 unidades. E então, é acondicionado em caixa papelão para transporte.

Descrição e Indicação

Os pacotes cirúrgicos são divididos em grupos que dependem da especialidade cirúrgica e dos requisitos do procedimento cirúrgico.

Os Kit's Cirúrgicos são usados em hospitais nas salas de cirurgia. Especificamente, os kit's cirúrgicos são usados para cobrir os pacientes, proporcionando uma barreira estéril entre o paciente e o médico durante procedimentos cirúrgicos. Em alguns produtos, os campos também fornecem absorção de fluidos, controle de instrumentos e linha e capacidade de coleta de fluidos.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Ago/19
	Instrução de Uso	IUKOCP-H rev. 00

Instruções de Uso

- Remova o pacote cirúrgico da embalagem com técnica asséptica, liberando o campo sobre a mesa auxiliar estéril.
- Desdobre o pacote cirúrgico com cuidado e de forma asséptica na mesa auxiliar e utilize os produtos na ordem em que estão dispostos.
- Os aventais devem ser desdobrados com cuidado. Os profissionais da sala de cirurgia deverão vesti-lo com cuidado, pois se trata de material estéril.
- Todos os componentes do kit devem ser descartados após o uso, de acordo com as regulamentações e normas ambientais locais.

Composição

Cobertura Mesa Mayo com Zona Reforçada: Filme de Polietileno com área de absorção com reforço em Spunbond (Polipropileno)

Cobertura de Mesa: Filme de Polietileno Laminado com Spunbond (Polipropileno)

Avental ULTRA: Não Tecido SMS (Polipropileno)

Toalha: Polpa de Celulose e Polímero (Polipropileno)

Saco Descartável para Fios de Sutura: Celulose

Campo Split para Cabeça e Pescoço: Não Tecido SMS (Polipropileno) com área de reforço (SMS Laminado com Filme Plástico)

Campo para Cabeça: Não tecido SMS (Polipropileno)

Não contém látex.

Não contém DEHP.

Condições de Armazenamento


O produto deve ser armazenado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

Condições para o Transporte

O produto deve ser transportado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

Condições de Manipulação

Todos os componentes do kit devem ser descartados após o uso, de acordo com as regulamentações e normas ambientais locais.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Ago/19
	Instrução de Uso	IUKOCP-H rev. 00

Advertências

Proibido Reprocessar.

Precauções

Descartar após o uso.

Não utilize se a embalagem estiver violada ou danificada.

Contraindicações:

Não aplicável.

Registrado por: CEDRS Gestão Empresarial.

Rua Silva Bueno nº 1660 conjunto 1001 – Ipiranga– São Paulo – SP – CEP: 04208-001.

CNPJ: 27.242.576/0001-11.

RT: Maria Angélica Rodrigues Pereira – COREN/SP: 039.294.

Distribuidor: CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

Rua Gama Cerqueira nº 331 e 337 – Cambuci – São Paulo – SP - CEP: 01539-010 -

CNPJ: 00.142.576/0001-86

Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br

Responsável Técnico: Morgana Borges de Araújo – CRF-SP: 74338

Fabricante Responsável: Halyard Health, Inc

5405 Windward Parkway - Alpharetta, Georgia – 30004 – Estados Unidos da América