	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Mar/20
	<b>Instrução de Uso</b>	IUKCC1-H rev. 01

## Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Kit Cirúrgico

Nome Comercial: Kit Cirúrgico Cardiovascular I Halyard

## Modelo

88731: Kit Cirúrgico Cardiovascular I Halyard

## Especificações

<u>Componentes</u>	<u>Tamanho</u>	<u>Quantidade</u>
Cobertura de Mesa	152 cm x 229 cm	1
Cobertura de Mesa Mayo	58cm x 137cm	1
Cobertura de Mesa Cirúrgica CV	152 cm x 193 cm	1
Propés	Regular	2
Avental ULTRA Reforçado	Grande	2
Avental ULTRA	Grande	1
Toalha Absorvente	38cm x 56cm	3
Campo Cirúrgico Split Cardiovascular	294 cm x 223 cm x 355 cm	1
Campo Cirúrgico Grande	152 cm x 193 cm	1
Campo Cirúrgico para Região Perineal	25cm x 64cm	1
Saco Descartável para Fios de Sutura	28cm x 30cm	1

Registro Anvisa: 81832580012

Reprocessamento Proibido.


Prazo de Validade: 05 anos

Embalagem unitária de Papel Grau Cirúrgico ou Tyvek\*.

Produto estéril - Óxido de Etileno. Não reesterilizar.


	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Mar/20
	<b>Instrução de Uso</b>	IUKCC1-H rev. 01

## Fotos

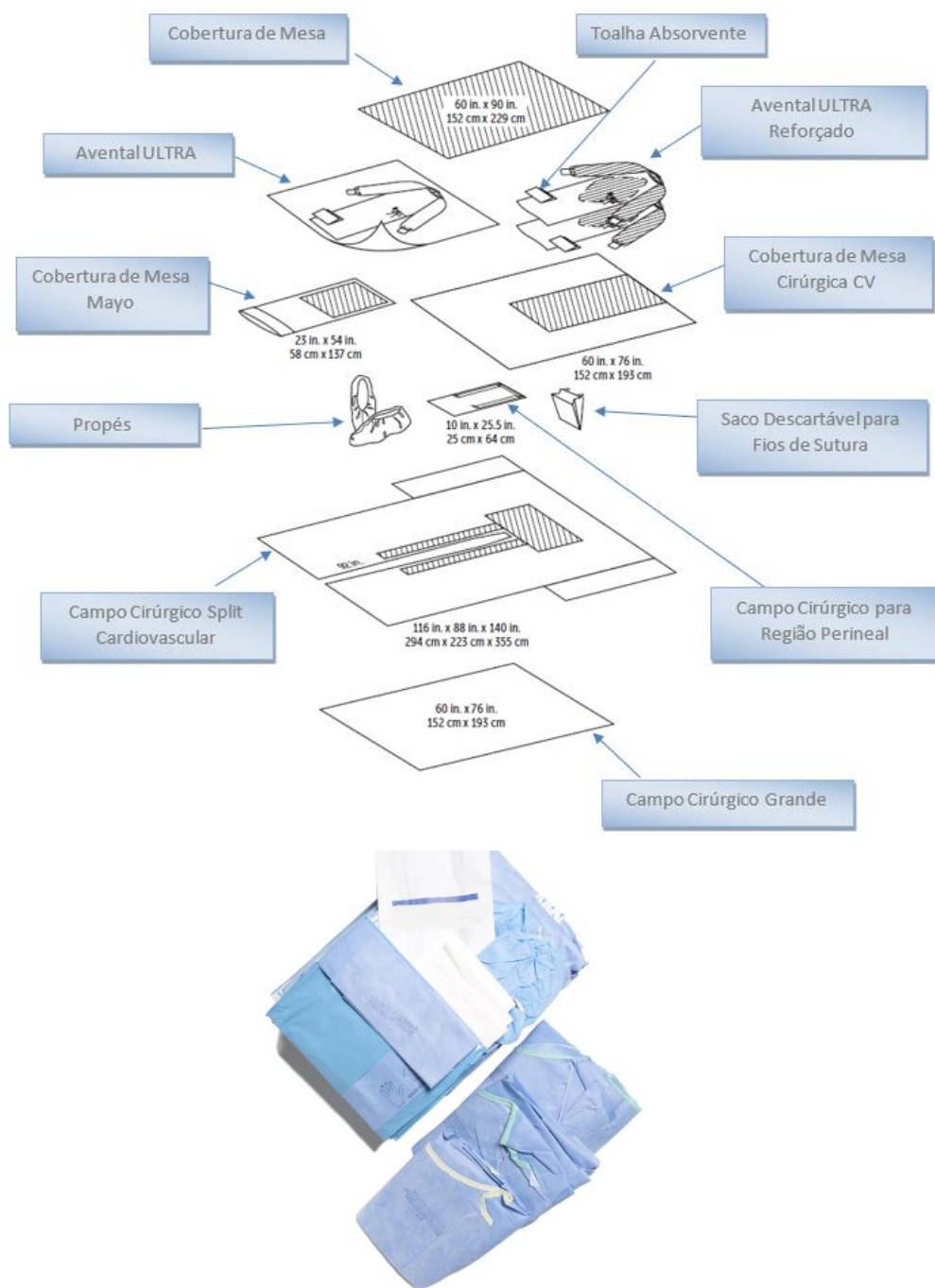

## Conteúdo

Cada unidade é composta por: 01 Cobertura de Mesa, 01 Cobertura de Mesa Mayo, 01 Cobertura de Mesa Cirúrgica CV, 02 Propés, 02 Aventais ULTRA Reforçado, 01 Avental ULTRA, 03 Toalhas Absorventes, 01 Campo Cirúrgico Split Cardiovascular, 01 Campo

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Mar/20
	<b>Instrução de Uso</b>	IUKCC1-H rev. 01

Cirúrgico Grande, 01 Campo Cirúrgico para Região Perineal, 01 Saco Descartável para Fios de Sutura.

Cada kit é embalado individualmente em embalagem de Filme Plástico e Papel Grau Cirúrgico ou Filme Plástico e Tyvek. As embalagens são armazenadas em uma bolsa de polietileno contendo 02 unidades. E então, são acondicionados em caixa papelão para transporte.

### **Descrição e Indicação**

Os pacotes cirúrgicos são divididos em grupos que dependem da especialidade cirúrgica e dos requisitos do procedimento cirúrgico.

Os Kit's Cirúrgicos são usados em hospitais nas salas de cirurgia. Especificamente, os kit's cirúrgicos são usados para cobrir os pacientes, proporcionando uma barreira estéril entre o paciente e o médico durante procedimentos cirúrgicos. Em alguns produtos, os campos também fornecem absorção de fluidos, controle de instrumentos e linha e capacidade de coleta de fluidos.

### **Instruções de Uso**

- Remova o pacote cirúrgico da embalagem com técnica asséptica, liberando o campo sobre a mesa auxiliar estéril.
- Desdobre o pacote cirúrgico com cuidado e de forma asséptica na mesa auxiliar e utilize os produtos na ordem em que estão dispostos.
- Os aventais devem ser desdobrados com cuidado. Os profissionais da sala de cirurgia deverão vesti-lo com cuidado, pois se trata de material estéril.
- Todos os componentes do kit devem ser descartados após o uso, de acordo com as regulamentações e normas ambientais locais.

### **Composição**

Cobertura de Mesa: Filme de Polietileno Laminado com Spunbond (Polipropileno)


Cobertura Mesa Mayo e Cobertura de Mesa Cirúrgica CV: Filme de Polietileno com área de absorção com reforço em Spunbond.

Propés: SMS

Avental ULTRA e ULTRA Reforçado: Não Tecido SMS (Polipropileno)

Toalha: Polpa de Celulose e Polímero (P Polipropileno)

Saco de Sutura: Celulose

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Mar/20
	<b>Instrução de Uso</b>	IUKCC1-H rev. 01

Campo Cirúrgico Grande e para Região Perineal: SMS

Campo Cirúrgico Split Cardiovascular: Não Tecido SMS (Polipropileno) + Filme Plástico de Polietileno

Não contém látex.

Não contém DEHP.

### **Condições de Armazenamento**

O produto deve ser armazenado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

### **Condições para o Transporte**

O produto deve ser transportado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

### **Condições de Manipulação**

Todos os componentes do kit devem ser descartados após o uso, de acordo com as regulamentações e normas ambientais locais.

### **Advertências**

Proibido Reprocessar.

### **Precauções**

Descartar após o uso.

Não utilize se a embalagem estiver violada ou danificada.

### **Contraindicações:**

Não aplicável.


**Registrado por:** CEDRS Gestão Empresarial.

Rua Silva Bueno nº 1660 conjunto 1001 – Ipiranga– São Paulo – SP – CEP: 04208-001.

CNPJ: 27.242.576/0001-11.

RT: Maria Angélica Rodrigues Pereira – COREN/SP: 039.294.

**Distribuidor:** CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Mar/20
	<b>Instrução de Uso</b>	IUKCC1-H rev. 01

Rua Gama Cerqueira nº 331 e 337 – Cambuci – São Paulo – SP - CEP: 01539-010 -

CNPJ: 00.142.576/0001-86

Tel: 011-3385-9339 – [sac@cnph.com.br](mailto:sac@cnph.com.br)

Responsável Técnico: Morgana Borges de Araújo – CRF-SP: 74338

**Fabricante Responsável:** O&M Halyard, Inc

9120 Lockwood Blvd - Mechanicsville, Virgínia - USA 23116