

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Mar/20
	Instrução de Uso	IUKCOB-H rev. 01

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Kit Cirúrgico

Nome Comercial: Kit Cirúrgico Obstétrico - Básico I Halyard

Modelo

44761: Kit Cirúrgico Obstétrico - Básico I Halyard

Especificações

<u>Componentes</u>	<u>Tamanho</u>	<u>Quantidade</u>
Cobertura de Mesa	152 cm x 229 cm	1
Campo para Região Glútea com Bolsa Graduada para Coleta de Fluidos	102 cm x 112 cm	1
Campo Cirúrgico	152 cm x 112 cm	1
Leggings	79 cm x 122 cm	2

Registro Anvisa: 81832580014

Reprocessamento Proibido.


Prazo de Validade: 05 anos

Embalagem unitária de Papel Grau Cirúrgico ou Tyvek*.

Produto estéril - Óxido de Etileno. Não reesterilizar.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Mar/20
	Instrução de Uso	IUKCOB-H rev. 01

Fotos

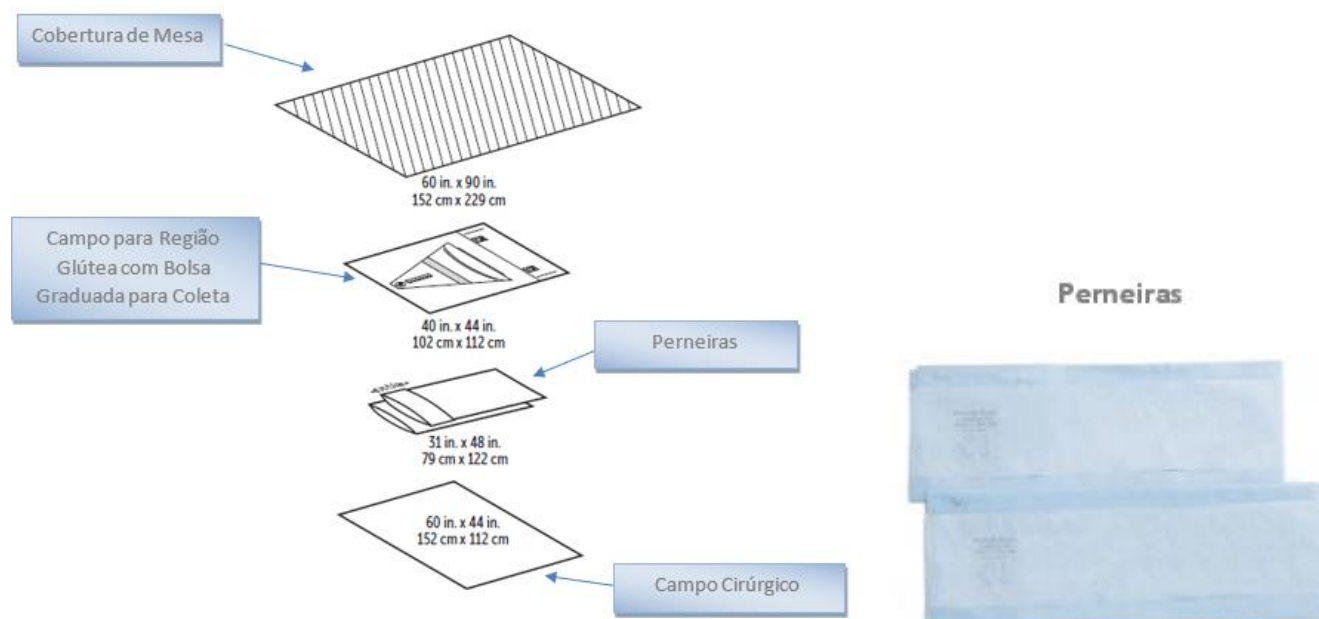

Conteúdo

Cada unidade do Kit é composta por: 01 Cobertura de Mesa, 01 Campo para Região Glútea com Bolsa Graduada para Coleta de Fluidos, 01 Campo Cirúrgico e 02 Perneiras.

O Kit é embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e Filme Plástico ou Tyvek* e Filme Plástico. As embalagens são armazenadas em uma bolsa de Polietileno contendo 10 unidades do Kit. E então, são acondicionados em caixa papelão para transporte, contendo 01 bolsa com 10 Kit's.

Descrição e Indicação

Os pacotes cirúrgicos são divididos em grupos que dependem da especialidade cirúrgica e dos requisitos do procedimento cirúrgico.

Os Campos Cirúrgicos são usados em hospitais nas salas de cirurgia. Especificamente, os campos cirúrgicos são usados para cobrir os pacientes, proporcionando uma barreira estéril entre o paciente e o médico durante procedimentos cirúrgicos. Em alguns produtos, os campos também fornecem absorção de fluidos, controle de instrumentos e linha e capacidade de coleta de fluidos.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Mar/20
	Instrução de Uso	IUKCOB-H rev. 01

Instruções de Uso

- Remova o pacote cirúrgico da embalagem com técnica asséptica, liberando o campo sobre a mesa auxiliar estéril.
- Desdobre o pacote cirúrgico com cuidado e de forma asséptica na mesa auxiliar e utilize os produtos na ordem em que estão dispostos.
- Os aventais devem ser desdobrados com cuidado. Os profissionais da sala de cirurgia deverão vesti-lo com cuidado, pois se trata de material estéril.
- Todos os componentes do kit devem ser descartados após o uso, de acordo com as regulamentações e normas ambientais locais.

Composição

Cobertura de Mesa: Filme de Polietileno Laminado com Spunbond (Polipropileno)

Campo Cirúrgico e Leggings: Não Tecido SMS (Polipropileno)

Campo para Região Glútea com Bolsa Graduada para Coleta de Fluidos: Polietileno

Não contém látex.

Não contém DEHP.

Condições de Armazenamento

O produto deve ser armazenado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

Condições para o Transporte

O produto deve ser transportado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

Condições de Manipulação

Todos os componentes do kit devem ser descartados após o uso, de acordo com as regulamentações e normas ambientais locais.

Advertências

Proibido Reprocessar.

Precauções

Descartar após o uso.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Mar/20
	Instrução de Uso	IUKCOB-H rev. 01

Não utilize se a embalagem estiver violada ou danificada.

Contraindicações:

Não aplicável.

Registrado por: CEDRS Gestão Empresarial.

Rua Silva Bueno nº 1660 conjunto 1001 – Ipiranga– São Paulo – SP – CEP: 04208-001.

CNPJ: 27.242.576/0001-11.

RT: Maria Angélica Rodrigues Pereira – COREN/SP: 039.294.

Distribuidor: CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

Rua Gama Cerqueira nº 331 e 337 – Cambuci – São Paulo – SP - CEP: 01539-010 -

CNPJ: 00.142.576/0001-86

Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br

Responsável Técnico: Morgana Borges de Araújo – CRF-SP: 74338

Fabricante Responsável: O&M Halyard, Inc

9120 Lockwood Blvd - Mechanicsville, Virgínia - USA 23116