



## Instrução de USO RDC185/01

### Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Nebulizador

Nome Comercial: Nebulizador Descartável de Pequeno Volume Micromist c/ máscara

Código do Fabricante: 1945 e 1946

Nº de registro na ANVISA: 10342600061

Produto de reprocessamento proibido

Prazo de Validade: 05 anos

Embalagem: Unitária.

Pronto uso

Não estéril

### Fotos



Máscara alongada ←

Copo do nebulizador ←

← Tubo de suprimento de O2 com conector universal

### Indicação e Finalidade

A terapia com nebulizadores de pequeno volume é indicada para uso em hospitais e home care. Sua finalidade é o tratamento de obstrução da via aérea. A obstrução da via aérea é uma das causas mais comuns dos problemas respiratórios e pode ser consequência dos seguintes motivos:

- doenças crônicas tais como asma, bronquite crônica e enfisema;
- exposição à poluição ambiental em local de trabalho;
- fumantes de longo prazo,



## Instrução de USO RDC185/01

- exposição à fumaça, fumos e outras substâncias nocivas presentes na atmosfera;
- alergias, gripes, resfriados e pneumonia.

### Modo de Uso

- Coloque a solução prescrita no copo do nebulizador.
- Conecte a tampa do copo do nebulizador girando-a no sentido horário.
- Conecte o tubo de suprimento de O<sub>2</sub> entre a fonte de gás e o nebulizador.
- Conecte o copo de nebulizador na máscara.
- Ajuste o fluxo de gás. Verifique visualmente o aparecimento de névoa. Caso necessário, dê uma leve batida no copo até que se inicie a nebulização.
- Coloque a máscara no paciente.
- Descartar após o uso.

### Componentes e Composição

- Copo do nebulizador (Reservatório): Poliestireno
  - Tampa do reservatório: Poliestireno
  - Tubo de suprimento de O<sub>2</sub> (2,10m): PVC
  - Máscara: PVC
- Não contém Látex

### Condições de Armazenamento

Armazenar à temperatura ambiente, em local seco, arejado e ao abrigo da luz natural.

### Condições para o Transporte

Transportar à temperatura ambiente, em local seco, arejado e ao abrigo da luz natural.

### Condições de Manipulação

N/A



COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES

IUNPMH-T  
rev.01

## Instrução de USO RDC185/01

### **Advertências**

Proibido Reprocessar

### **Precauções**

Certifique-se que todas as conexões estão seguras.

**Importador/Distribuidor:** *CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares*

Rua Gama Cerqueira, 331 - CEP: 01539-010 - Cambuci - São Paulo – SP

Tel: 011-3385-9339 – [sac@cnph.com.br](mailto:sac@cnph.com.br)

Responsável Técnico: Morgana Borges de Araújo CRF-SP: 74338

Fabricante Responsável: Teleflex Medical 2917, Weck Drive. Research Triangle Park, NC 27709 - EUA.

-

**Responsável Técnico**

Morgana Borges de Araújo  
Farmacêutico - CRF/SP: 74338