

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	IUCSP-P rev.00
	Instrução de USO RDC185/01	

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Válvulas e Conectores de Tubos

Nome Comercial: Conector swível com port de exalação

Modelos: 313-5051.

Nº do Cadastro na ANVISA: 10342600070

O Fabricante recomenda uso único


Prazo de Validade: Indeterminado

Embalagem: Unitária.

Produto Não Estéril

Proibido Reprocessar

Fotos

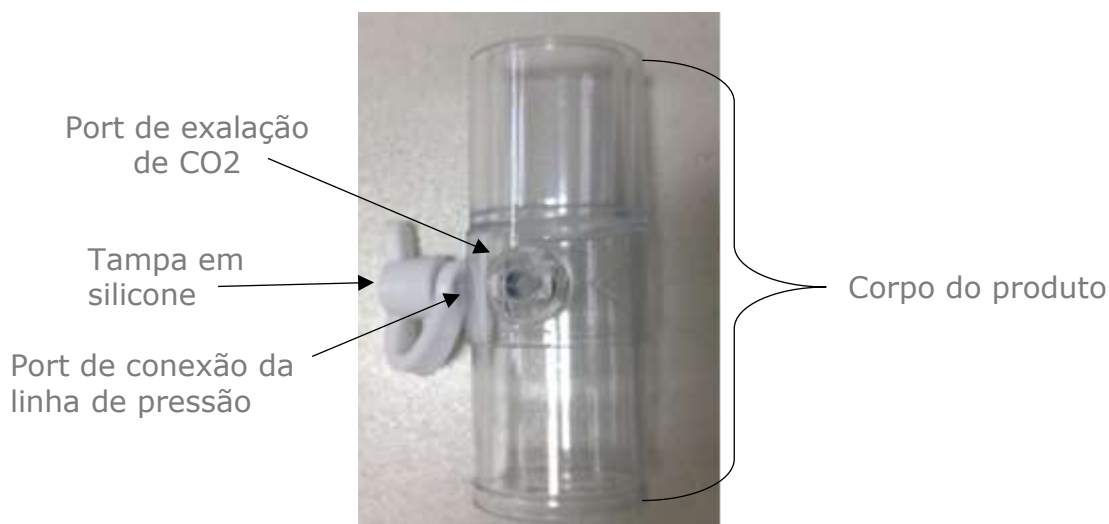

Indicação de Uso/Finalidade

O Conector swível com port de exalação é indicado para ser usado juntamente com um circuito ou máscara respiratória (interface) entre o paciente e o sistema de ventilação mecânica. Sua finalidade é permitir que o gás exalado pelo paciente (CO₂) saia para a atmosfera ou para outro circuito fechado.

Modo de Uso

- Antes de utilizar, certifique-se de que o Conector swível com port de exalação encontra-se adequadamente limpo.
- Adapte o Conector swível com port de exalação entre o circuito e a interface (máscara/tubo traqueal) a ser utilizada no paciente.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	IUCSP-P rev.00
	Instrução de USO RDC185/01	

- Conecte o circuito ao Sistema de Ventilação e siga o procedimento médico normalmente. Se necessário monitorar a pressão, remova a tampa de silicone que protege o port e conecte uma linha de pressão.
- Descartar após o uso

Componentes e Composição

Corpo do produto: Policarbonato e Acetal.

Tampa branca: Silicone.

Produto livre de látex Clip: Polipropileno

Filtro: Polipropileno

Condições de Armazenamento

Armazenar o produto em temperatura entre 10 e 45° C, em local seco, ventilado e ao abrigo da luz solar.

Condições para o Transporte

Os conectores devem ser transportados em temperatura entre 10 e 45°C.

Não devem ser expostos ao sol

Condições de Manipulação

- Não utilize o produto caso sua embalagem esteja danificada.
- Faça uso do produto conforme Instruções de uso que o acompanham.
- A abertura de ventilação do port de exalação foi projetada para permitir a saída de CO2 do circuito do paciente. Para o funcionamento seguro do produto é necessário que haja um fluxo contínuo. Não bloqueie ou feche a abertura do port de exalação.
- Proibido reprocessar

Advertências

N/A

Precauções

- Não utilize o conector sem prévio conhecimento ou supervisão adequada.
- Não utilize o conector se encontrar vazamento.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	IUCSP-P rev.00
	Instrução de USO RDC185/01	

- Certifique-se se os conectores são adequados e se estão conectados corretamente.
- Não utilize este produto para qualquer outra atividade que não seja a indicada.
- A não observância destas precauções será considerado mau uso do produto.

Contraindicações

N/A


Importador/Distribuidor: CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

Rua Gama Cerqueira, 331 - CEP: 01539-010 - Cambuci - São Paulo – SP

Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br

Responsável Técnico: Morgana Borges de Araújo CRF-SP: 74338

Fabricante Responsável: Pulmodyne, Inc; 2055 Executive Drive, Indianapolis, IN 46241

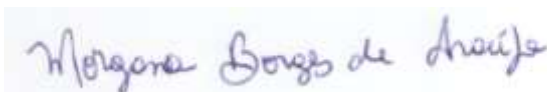

Responsável Técnico
Morgana Borges de Araújo
Farmacêutico - CRF/SP: 74338