

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Set/20
	Instrução de Uso	

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Máscaras

Nome Comercial: Respirador e Máscara Cirúrgica N95 FLUIDSHIELD* 3 Halyard

Modelo e Especificações Técnicas:

Código	Tamanho	Largura Rosto Polegadas	Largura Rosto cm	Altura Polegadas	Altura cm	Largura Queixo Polegadas	Largura Queixo cm	Cor	Embalagem
46727	Normal	10	25,4	3,8	9,65	3	7,6	Laranja	35 unidades por dispenser
46728	Normal	10	25,4	3,8	9,65	3	7,6	Laranja	35 unidades por dispenser embaladas individualmente
46827	Pequeno	8,5	21,6	3,5	8,9	2,5	6,3	Laranja	35 unidades por dispenser
46828	Pequeno	8,5	21,6	3,5	8,9	2,5	6,3	Laranja	35 unidades por dispenser embaladas individualmente

O filtro de partículas N95 (95% do nível de eficiência do filtro) é eficaz contra aerossóis em partículas sem óleo.

Cor: Laranja

Tipo: Respirador

Nível de Proteção: Nível 3

Resistencia a Fluídos: Sim

Nível de Proteção ASTM: Nível 3

BFE (3) \geq 99%

Resistência ao Respingo (80,120,160): 160

Eficiência de Filtração: 95%

PFE (.1) \geq 99%

Registro Anvisa: 81832580064

Reprocessamento Proibido.


	<p>COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES</p>	<p>Emissão: Set/20</p>
	<p>Instrução de Uso</p>	<p>IURMN95-H rev. 00</p>

Prazo de Validade: 05 anos

Embalagem em forma de Dispenser

Produto de Pronto Uso.

Fotos

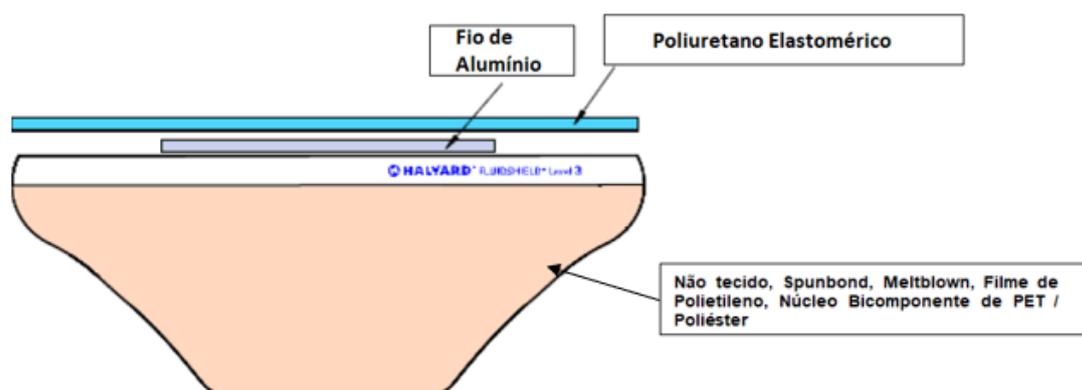

Conteúdo

São embaladas 35 unidades de máscaras em um dispenser de papel cartonado e então são acondicionadas em caixa de papelão para transporte contendo 210 unidades (6 dispensers).

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Set/20
	Instrução de Uso	IURMN95-H rev. 00

Descrição e Indicação

Os Respiradores e Máscaras Cirúrgicas N95 são indicados para proteção contra a inalação de particulados sólidos e líquidos.

O Respirador e Máscara Cirúrgica N95 devem ser utilizados pelo pessoal da sala de operações e outros profissionais de saúde para proteger pacientes e profissionais de saúde da transferência de microrganismos, fluidos corporais e sanguíneos e materiais particulados transportados pelo ar.

Este produto não elimina completamente o risco de contrair doenças ou infecções.

Instruções de Uso

Instruções de aplicação

1. Retire o respirador/máscara da embalagem
2. Separe as bordas do respirador para abri-lo por completo.
3. Dobre levemente o ajuste do nariz como para formar uma curvatura.
4. Segure o respirador/máscara ao contrário para que os elásticos fiquem expostos.
5. Separe os dois elásticos com o indicador e o polegar.
6. Enquanto segura os elásticos com o indicador e o polegar, posicione o respirador/máscara abaixo do queixo.
7. Puxe os elásticos para cima sobre a cabeça.
8. Solte o elástico inferior dos polegares e coloque-o na base do pescoço.
9. Coloque o outro elástico na nuca.
10. Pressione o respirador/máscara firmemente com os dedos de forma a poder moldá-lo no nariz.
11. Continue a ajustar o respirador/máscara e mantenha as bordas seguras até sentir que tenha conseguido um bom ajuste facial. Agora, verifique se o respirador/máscara está bem ajustado.

Instruções de ajustamento:

- Utilize com o lado cor de laranja virado para fora.
- Siga as instruções de aplicação sempre que o respirador/máscara for utilizado.
- Verifique a aderência facial para garantir o ajustamento adequado antes de entrar em qualquer área contaminada.
- Ajuste bem ao nariz. Se verificar a saída de ar em volta do nariz:

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Set/20
	Instrução de Uso	IURMN95-H rev. 00

- Reposicione os elásticos para assegurar a aderência facial em volta das extremidades do respirador/máscara.
- Não entre numa área contaminada se não puder obter uma aderência adequada. Siga todas as instruções e advertências sobre a utilização deste respirador/máscara, obtenha um ajustamento adequado e utilize-o durante todas as situações de exposição. Se não proceder deste modo, reduzirá a eficiência do respirador e a proteção do utilizador, o que pode resultar em doença ou morte.

Instruções de utilização:

1. Antes de utilizar, o profissional deve ser treinado sobre a utilização adequada do respirador/máscara, em conformidade com as normas aplicáveis de segurança e de higiene.
2. Se o respirador/máscara for danificado ou se sentir dificuldade em respirar, saia da área onde se encontra.
3. Descarte e substitua o respirador/máscara.

Composição

Não tecido, Spunbond - Polipropileno na cor Laranja

Meltblown - Polipropileno

Filme de Polietileno

Núcleo Bicomponente de PET / Poliéster

Não tecido, Spunbond - Polipropileno

Fio de Alumínio

Poliuretano Elastomérico

Não contém látex de borracha natural

Condições de Armazenamento

O produto deve ser armazenado em temperatura entre -20°C e 30°C. Manter em local limpo, sem poeira, fresco, seco (com menos de 60% de umidade), longe de luz fluorescente ou ultravioleta e deve-se proteger do calor e da radioatividade.

Mantenha o máximo possível em sua embalagem original.

Condições para o Transporte

O produto deve ser transportado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Set/20
	Instrução de Uso	

Condições de Manipulação

Deve ser descartado após o uso, de acordo com as regulamentações e normas ambientais locais.

Advertências

— Proibido Reprocessar

Precauções

- Não deve ser usado em atmosferas que contenham menos de 19,5% de oxigênio;
- Não deve ser usado em atmosferas imediatamente perigosas para a vida ou a saúde;
- Não exceda as concentrações máximas de uso estabelecidas pelos padrões regulamentares;
- A não utilização adequada deste produto pode não alcançar os objetivos esperados

Contraindicações:

Não aplicável.

Registrado por: CEDRS Gestão Empresarial.

Rua Silva Bueno nº 1660 conjunto 1001 – Ipiranga– São Paulo – SP – CEP: 04208-001.

CNPJ: 27.242.576/0001-11.

RT: Maria Angélica Rodrigues Pereira – COREN/SP: 039.294.

Distribuidor: CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

Rua Gama Cerqueira nº 331 e 337 – Cambuci – São Paulo – SP - CEP: 01539-010 -

CNPJ: 00.142.576/0001-86

Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br

Responsável Técnico: Débora Podmowski Adjajian – CRF-SP: 84.729

Fabricante Responsável: O&M Halyard, Inc

9120 Lockwood Blvd - Mechanicsville, Virgínia - USA 23116