

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Ago/19
	Instrução de Uso	IUKCOP-H rev. 00

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Kit Cirúrgico

Nome Comercial: Kit Cirúrgico para Ombro tipo Cadeira de Praia Halyard

Modelo

88108: Kit Cirúrgico para Ombro tipo Cadeira de Praia Halyard

Especificações

Componente	Tamanho	Quantidade
Cobertura de Mesa	127 cm x 228 cm	1
Campo tipo Cadeira de Praia	254 cm x 436 cm	1
Bolsa de Coleta para Fluídos Acoplável	89 cm x 109 cm	1
Campo Split Impermeável	152 cm x 178 cm	1
Cobertura Mesa Mayo com Zona Reforçada	58 cm x 137 cm	1
Saco Descartável para Suturas	28 cm x 30 cm	1
Avental Aero Chrome*	Extra-Grande- Extra- Longo	1
Avental ULTRA*	Grande	1
Toalha Absorvente	38 cm x 56 cm	2

Registro Anvisa: 81832580036

Reprocessamento Proibido.


Prazo de Validade: 05 anos

Embalagem unitária de Papel Grau Cirúrgico ou Tyvek*.

Produto estéril - Óxido de Etileno. Não reesterilizar.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Ago/19
	Instrução de Uso	IUKCOCP-H rev. 00


Fotos

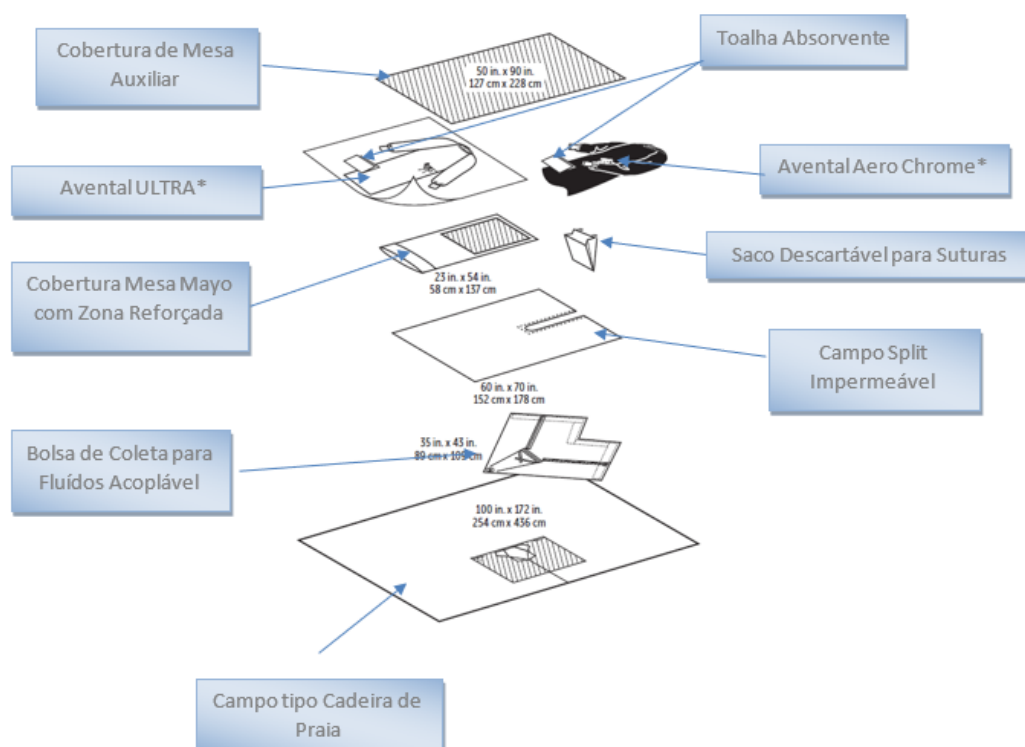

Conteúdo

Cada unidade do Kit é composta por: 01 Cobertura de Mesa, 01 Campo tipo Cadeira de Praia, 01 Bolsa de Coleta para Flúidos Acoplável, 01 Campo Split Impermeável, 01 Cobertura Mesa Mayo com Zona Reforçada, 01 Saco Descartável para Suturas, 01 Avental Aero Chrome*. 01 Avental ULTRA*, 02 Toalhas Absorventes.

Embalado individualmente em embalagem de Papel Grau Cirúrgico ou Tyvek* com Plástico Filme. As embalagens são armazenadas em uma bolsa de Polietileno contendo 01 ou 02

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Ago/19
	Instrução de Uso	IUKCOP-H rev. 00

embalagens em cada bolsa. E então, são acondicionados em caixa de papelão para transporte com 03 unidades do produto em cada caixa

Descrição e Indicação

Os pacotes cirúrgicos são divididos em grupos que dependem da especialidade cirúrgica e dos requisitos do procedimento cirúrgico.

Os Campos Cirúrgicos são usados em hospitais nas salas de cirurgia. Especificamente, os campos cirúrgicos são usados para cobrir os pacientes, proporcionando uma barreira estéril entre o paciente e o médico durante procedimentos cirúrgicos. Em alguns produtos, os campos também fornecem absorção de fluidos, controle de instrumentos e linha e capacidade de coleta de fluidos.

Instruções de Uso

. Remova o pacote cirúrgico da embalagem com técnica asséptica, liberando o campo sobre a mesa auxiliar estéril.

- Desdobre o pacote cirúrgico com cuidado e de forma asséptica na mesa auxiliar e utilize os produtos na ordem em que estão dispostos.
- Os aventais deverão ser desdobrados respeitando técnica asséptica, antes de serem vestidos;
- Todos os componentes do kit devem ser descartados após o uso, de acordo com as regulamentações e normas ambientais locais.

Composição

Cobertura de Mesa: Filme de Polietileno Laminado com Spunbond (Polipropileno)

Cobertura Mesa Mayo com Zona Reforçada: Filme de Polietileno com Área de Absorção com Reforço em Spunbond (Polipropileno)

Campo Split Impermeável: Filme de Polietileno


Campo tipo Cadeira de Praia: Não-Tecido SMS (Polipropileno) com Área de Reforço (SMS + Filme Plástico)

Bolsa de Coleta para Fluídos Acoplável: Filme de Polietileno

Saco Descartável para Suturas: Celulose

Avental Aero Chrome*: SMS na Parte Traseira e S/F/SMS Laminado de Spunbond, Filme e SMS na Parte Frontal e Mangas

Avental ULTRA*: Não-Tecido SMS (Polipropileno)

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Ago/19
	Instrução de Uso	IUKCOP-H rev. 00

Toalha: Polpa de Celulose e Polímero (Polipropileno)

Não contém látex.

Não contém DEHP.

Condições de Armazenamento

O produto deve ser armazenado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

Condições para o Transporte

O produto deve ser transportado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

Condições de Manipulação

Todos os componentes do kit devem ser descartados após o uso, de acordo com as regulamentações e normas ambientais locais.

Advertências

Proibido Reprocessar.

Precauções

Descartar após o uso.

Não utilize se a embalagem estiver violada ou danificada.

Contraindicações:

Não aplicável.

Registrado por: CEDRS Gestão Empresarial.

Rua Silva Bueno nº 1660 conjunto 1001 – Ipiranga– São Paulo – SP – CEP: 04208-001.

CNPJ: 27.242.576/0001-11.

RT: Maria Angélica Rodrigues Pereira – COREN/SP: 039.294.

Distribuidor: CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

Rua Gama Cerqueira nº 331 e 337 – Cambuci – São Paulo – SP - CEP: 01539-010 -

CNPJ: 00.142.576/0001-86

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Ago/19
	Instrução de Uso	IUKCOP-H rev. 00

Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br

Responsável Técnico: Morgana Borges de Araújo – CRF-SP: 74338

Fabricante Responsável: Halyard Health, Inc

5405 Windward Parkway - Alpharetta, Georgia – 30004 – Estados Unidos da América