	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Ago/19
	Instrução de Uso	IUKCBO-H rev. 00

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Kit Cirúrgico

Nome Comercial: Kit Cirúrgico BASICS* Obstetrícia Halyard

Modelo

77913: Kit Cirúrgico BASICS* Obstetrícia Halyard

Especificações

<u>Componentes</u>	<u>Tamanho</u>	<u>Quantidade</u>
Cobertura de Mesa	152 cm x 229 cm	1
Avental Cirúrgico BASICS*	Grande	1
Toalha Absorvente	38cm x 56cm	3
Campo Cirúrgico para Região Glútea com Bolsa Coletora de Fluídos Graduada	102 cm x 112 cm	1
Cobertura Mesa Mayo	58 cm x 137 cm	1
Campo Cirúrgico	152cm x 112cm	1
Perneira	79 cm x 122 cm	2


Registro Anvisa: 81832580009

Reprocessamento Proibido.


Prazo de Validade: 05 anos

Embalagem unitária de Papel Grau Cirúrgico ou Tyvek*.

Produto estéril - Óxido de Etileno. Não reesterilizar.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Ago/19
	Instrução de Uso	IUKCBO-H rev. 00


Fotos

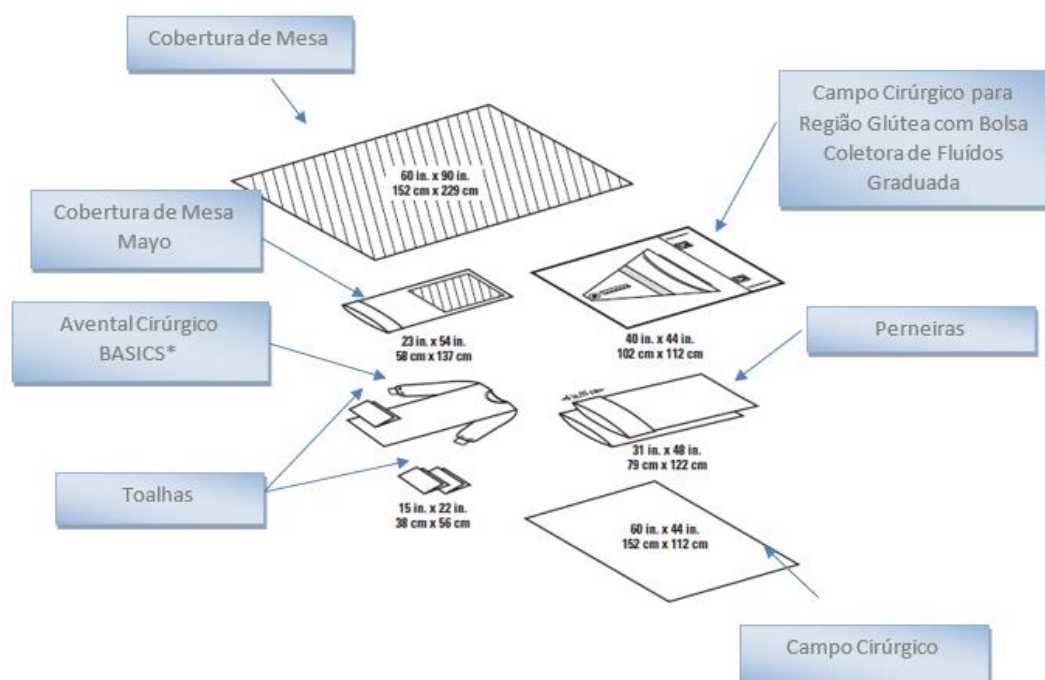

Conteúdo

Cada unidade é composta por: 01 Cobertura de Mesa, 01 Avental Cirúrgico BASICS*, 03 Toalhas Absorventes, 01 Campo Cirúrgico para Região Glútea com Bolsa Coletora de Fluidos Graduada, 01 Cobertura de Mesa Mayo, 01 Campo Cirúrgico, 02 Perneiras.

Cada kit é embalado individualmente em embalagem de Filme Plástico e Papel Grau Cirúrgico ou Filme Plástico e Tyvek*. As embalagens são armazenadas em uma bolsa de Polietileno contendo 07 unidades. E então, são acondicionados em caixa papelão para transporte.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Ago/19
	Instrução de Uso	IUKCBO-H rev. 00

Descrição e Indicação

Os pacotes cirúrgicos são divididos em grupos que dependem da especialidade cirúrgica e dos requisitos do procedimento cirúrgico.

Os Kit's Cirúrgicos são usados em hospitais nas salas de cirurgia. Especificamente, os kit's cirúrgicos são usados para cobrir os pacientes, proporcionando uma barreira estéril entre o paciente e o médico durante procedimentos cirúrgicos. Em alguns produtos, os campos também fornecem absorção de fluidos, controle de instrumentos e linha e capacidade de coleta de fluidos.

Instruções de Uso

- Remova o pacote cirúrgico da embalagem com técnica asséptica, liberando o campo sobre a mesa auxiliar estéril.
- Desdobre o pacote cirúrgico com cuidado e de forma asséptica na mesa auxiliar e utilize os produtos na ordem em que estão dispostos.
- Os aventais devem ser desdobrados com cuidado. Os profissionais da sala de cirurgia deverão vesti-lo com cuidado, pois se trata de material estéril.
- Todos os componentes do kit devem ser descartados após o uso, de acordo com as regulamentações e normas ambientais locais.

Composição

Cobertura de Mesa: Filme de Polietileno Laminado com Spunbond (Polipropileno)

Cobertura Mesa Mayo: Filme de Polietileno com área de absorção com reforço em Spunbond (Polipropileno)

Avental: Não Tecido SMS (Polipropileno)

Toalha: Polpa de Celulose e Polímero (Polipropileno)

Campo Cirúrgico para Região Glútea com Bolsa Coletora de Fluídos Graduada: Filme Plástico de Polietileno

Campo Cirúrgico: SMS

Não contém látex.

Não contém DEHP.

Condições de Armazenamento

O produto deve ser armazenado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Ago/19
	Instrução de Uso	IUKCBO-H rev. 00

Condições para o Transporte

O produto deve ser transportado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

Condições de Manipulação

Todos os componentes do kit devem ser descartados após o uso, de acordo com as regulamentações e normas ambientais locais.

Advertências

Proibido Reprocessar.

Precauções

Descartar após o uso.

Não utilize se a embalagem estiver violada ou danificada.

Contraindicações:

Não aplicável.

Registrado por: CEDRS Gestão Empresarial.

Rua Silva Bueno nº 1660 conjunto 1001 – Ipiranga– São Paulo – SP – CEP: 04208-001.

CNPJ: 27.242.576/0001-11.

RT: Maria Angélica Rodrigues Pereira – COREN/SP: 039.294.

Distribuidor: CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

Rua Gama Cerqueira nº 331 e 337 – Cambuci – São Paulo – SP - CEP: 01539-010 -

CNPJ: 00.142.576/0001-86

Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br

Responsável Técnico: Morgana Borges de Araújo – CRF-SP: 74338

Fabricante Responsável: Halyard Health, Inc

5405 Windward Parkway - Alpharetta, Georgia – 30004 – Estados Unidos da América